



- EN** Do not exceed the Power Level below. Exceeding the level may lead to the tip breaking or damage to the surface of the tooth.
- DE** Überschreiten Sie nicht die unten genannte Leistungsstufe. Wenn die Leistungsstufe überschritten wird, kann die Spitze brechen oder die Zahnoberfläche verletzt werden.
- FR** Ne dépassez pas le niveau de puissance ci-dessous. Si vous dépassez ce niveau, l'insert pourrait se casser ou la surface de la dent pourrait être endommagée.
- ES** No supere el nivel de potencia máximo recomendado en la tabla que inferior. Si supera el nivel, la punta puede romperse o dañar la superficie de los dientes.
- IT** Non superare il livello di potenza indicato di seguito. In tal caso, la punta potrebbe rompersi o la superficie del dente potrebbe riportare lesioni.
- PT** Não exceda o nível de potência abaixo. Se exceder o nível, a ponta pode quebrar ou a superfície do dente pode sofrer lesões.

Applications	Tips	Power Level		
		1	2	3
Scaling	S1, S2, S3	←————→		
Perio	S10, S20, S21R, S21L	←————→		
Maintenance Tip	S35+V-Tip(V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12)	←————→		
For Preparation of crown cores	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	←————→		
For Minimal Intervention	S65D, S66D, S67D, S68D	←————→		
Endodontics	S75+V-Tip(V-U15~V-U35)	←——→		



- EN** Refer to the operation manual of the air scaler handpiece for usage.
- DE** Informationen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Airscaler-Handstücks.
- FR** Reportez-vous au manuel du détartreur pneumatique pour l'utilisation.
- ES** Consulte el manual de funcionamiento de la pieza de mano del escarificador para su uso.
- IT** Fare riferimento al manuale operativo del manipolo dell'ablatores ad aria per l'uso.
- PT** Consulte o manual de operação da peça de mão do destartarizador de ar para uso.