

EN Be sure to always use the tip at a setting not exceeding the maximum power level below. If the tip is used in excess of the maximum power, the tip could break or excess cutting could occur.

FR Veuillez à toujours utiliser l'insert avec un réglage ne dépassant pas le niveau maximal de puissance ci-dessous. Si l'insert est utilisé avec une puissance dépassant la puissance maximale, il risque de se casser ou la coupe risque d'être excessive.

Model	Varios2	Vários
	Max	
G1	G 7	G 3
G2	G 7	G Max
G3	G 7	G 3
G4	G 5	G 3
G5	G 6	G 3
G6	G 8	G 1
G7	—	G Max
G8	G 7	G 3
G9	G 5	G 1
G11	G 6	G 3
G12	G 7	G 3
G13	G 6	G 3
G16	G 8	—
G21	G 4	G 2
G22	G 4	G 2
G25	G 10	G 4
G26	G 10	G Max
G28	G 10	G 2
G61D	G 2	G 2
G62D	G 2	G 3
G65D	G 2	G 2
G66D	G 2	G 2
G67D	G 2	G 3
G68D	G 2	G 3

Model	Varios2	Vários
	Max	
E4	E 6	E 3
E4D	E 7	E 3
E5	E 10	E 3
E6	E 10	E 4
E7	E 6	E Max
E7D	E 6	E Max
E8	E 2	E 4
E8D	E 2	E 4
E9	E 6	E 4
E9D	E 7	E 4
E14D	E 7	E 3
E15D	E 6	E 3
E11	E 4	E 3
E12	E 3	E 3
E30RD	E 6	E 3
E30LD	E 6	E 3
E31D	E 6	E 3
E32D	E 6	E 3

Model	Varios2	Vários
	Max	
P1	P 6	P 2
P1D	P 10	P 2
P2D	P 8	P 4
P3D	P 8	P 4
P10	P 10	P Max
P11R	P 10	P Max
P11L	P 10	P Max
P20	P 8	P 4
P21R	P 8	P 4
P21L	P 8	P 4
P25R	P 10	P 4
P25L	P 10	P 4
P26R	P 6	P 3
P26L	P 6	P 3
P40	P 3	P 1
P41	P 3	P 1

Model	Varios2	Vários
	Max	
V-G70	G 6	G 3
V-G71	G 6	G 3
V-G72	G 6	G 3
V-G75	G 6	G 1
V-G76	G 6	G 3
V-G77	G 6	G 3
V-G78	G 6	G 3
V-G79	G 6	G 3
V-N50	E 3	E 3
V-N51	E 2	E 3
V-P10	P 6	P 3
V-P11R	P 6	P 3
V-P11L	P 6	P 3
V-P12	P 6	P 3
V-P26R	P 6	P 3
V-P26L	P 6	P 3
V-S1	G 6	E 3
V-S3	G 4	E 3
V-S33	G 6	E 3
V-S50	E 5	E 3
V-S50D	E 5	E 3
V-S51	E 3	E 1
V-S51D	E 3	E 1
V-S52	E 5	E 2
V-S52D	E 5	E 2
V-S53	E 5	E 2
V-S53D	E 5	E 2